


Nasco
Life/form®

**SIMULATORE PER IL
BENDAGGIO CHIRURGICO
"SURGICAL SALLY"
LF00929U
MANUALE ISTRUZIONI**

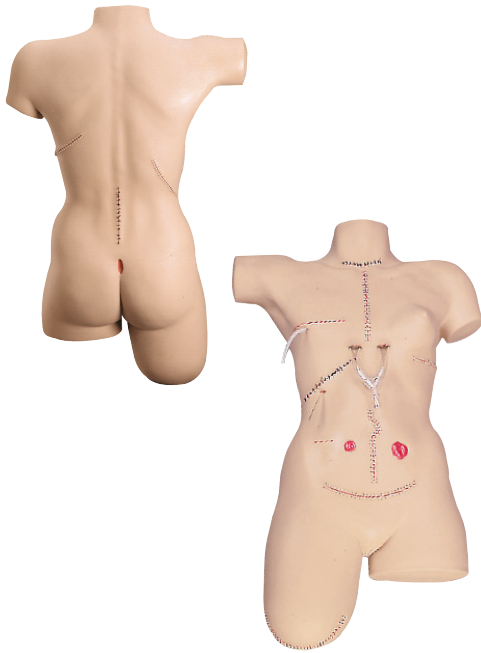

Life/form® Prodotti NASCO



ELENCO FUNZIONALITÀ

Il simulatore è dotato delle seguenti ferite simulate:

- Tiroidectomia
- Split emisternale con tubo di drenaggio toracico
- Mastectomia con drenaggio simulato
- Colectomia con tubo a T simulato
- Laparotomia
- Appendectomia
- Colostomia
- Ileostomia
- Isterectomia transaddominale
- Toracotomia
- Nefrectomia
- Laminectomia
- Ulcera da decubito sacrale — secondo stadio
- Moncone di amputazione della gamba

Il simulatore per il bendaggio **Life/form®** "Surgical Sally" viene fornito completo di contenitore resistente per il trasporto. Peso di spedizione: 12 kg circa.

INFORMAZIONI SUL SIMULATORE

Il simulatore per il bendaggio chirurgico **Life/form®** "Surgical Sally" rappresenta un corpo femminile di 73.5 cm x 43 cm con 14 ferite chirurgiche, una fenditura emisternale con tubo di drenaggio toracico, un'ulcera da decubito sacrale di stadio 2 ed un moncone dovuto all'amputazione di una gamba. Anche la cute è di nuova formulazione per cui risulta più secca per una migliore adesione delle bende. Le chiusure delle ferite sono state aggiornate con punti metallici per lo split emisternale, la toracotomia, la nefrectomia, la laparotomia, l'isterectomia transaddominale ed il moncone di amputazione.

PRECAUZIONI:

1. Non collocare mai il simulatore su qualsiasi tipo di carta o plastica stampata. Questi materiali sono in grado di provocare macchie indelebili. Anche le penne a sfera creano macchie indelebili.
2. Non usare solventi o materiali corrosivi per rimuovere le tracce residue di adesivo. Usare solo Glue Off (LF01023U) pena la nullità della garanzia.
3. Non usare soluzioni di iodio-povidone in quanto possono macchiare indelebilmente il simulatore.

CURA DEL SIMULATORE

La normale sporcizia può essere rimossa con un sapone delicato ed acqua. Il pulitore REN (W9919U) è in grado di rimuovere le macchie resistenti dal simulatore. Basta applicare lo REN alla zona macchiata e strofinare con un panno morbido o di carta.

MATERIALI DI CONSUMO/PARTI DI RICAMBIO PER IL SIMULATORE PER BENDAGGIO *Life/form*®

“SURGICAL SALLY”

LF01023U NASCO Glue Off

W09919U Pulitore REN, bottiglia da 340 gr.

Altri simulatori disponibili

- LF00698U** Braccio adulto iniettabile (Bianco)
LF00856U Cateterizzazione della donna
LF00901U Esame della prostata
LF00906U Cura delle ostomie
LF00929U Bendaggio chirurgico
LF00957U Somministrazione di un clistere
LF00958U Braccio iniettabile pediatrico
LF00961U Iniezione intramuscolare
LF00984U Esame del seno
LF00995U Braccio per puntura arterie
LF00997U Braccio adulto iniettabile (Nero)
LF00999U Testa pediatrica iniettabile
LF01008U Braccio per iniezioni intradermiche
LF01012U Cateterizzazione cardiaca (Nutrizione Parenterale Totale)
LF01019U Esame dell'orecchio
LF01020U Kit orecchio supplementare
LF01025U Cath-Ed I uomo
LF01026U Cath-Ed II donna
LF01027U Dialisi peritoneale
LF01028U Braccio per esercitazioni suturazione
LF01036U Iniezioni spinali
LF01037U Braccio per emodialisi
LF01062U Pelvi, Normale e anormale
LF01063U Bendaggio moncone, superiore
LF01064U Bendaggio moncone, inferiore
LF01069U Assottigliamento e dilatazione della cervice
LF01070U Postazione parto
LF01082U Cricotirotomia
LF01083U Trattamento delle tracheostomie
LF01084U Esame sigmoidoscopico
LF01087U Cannulazione venosa centrale
LF01095U Braccio per misurazione della pressione
LF01108U Simulatore di infusioni intraossee
LF01121U Braccio flebo avanzato
LF01139U Mano flebo avanzata
LF01142U Simulatore didattico per le auscultazioni
LF01162U Simulatore didattico flebo Venatech
LF03000U Serie **CPARLENE**®
LF03601U Simulatore didattico per la gestione delle vie aeree dell'adulto
LF03602U Gestione delle vie aeree dell'adulto su manichino
LF03603U Gestione delle vie aeree solo testa
LF03609U Simulatore didattico per la gestione delle vie aeree del bambino
LF03610U Simulatore didattico per la gestione delle vie aeree del bambino solo testa
LF03611U Cute torace defibrillazione bambino
LF03612U Braccio per flebo bambino
LF03613U Braccio pressione arteriosa bambino
LF03614U Infusione intraossea/accesso femorale bambino solo gamba
LF03615U Kit di aggiornamento completo **CRiSis**™ bambino
LF03616U Manichino **CRiSis**™ bambino
LF03617U Manichino **CRiSis**™ bambino versione lusso con tutore aritmie
LF03620U Kit di aggiornamento PALS
LF03621U Simulatore didattico per la gestione delle vie aeree del neonato solo testa
LF03622U Infusione intraossea gamba destra
LF03623U Simulatore didattico per la gestione delle vie aeree del neonato
LF03626U Tampone iniezioni di ricambio per accesso femorale bambino
LF03632U Gamba per infusione intraossea/accesso femorale nel bambino su stativo
LF03633U Simulatore per la gestione delle vie aeree nel bambino con tronco
LF03693U Manichino per CPR **Basic Buddy**
LF03699U Simulatore didattico per la gestione delle vie aeree "Airway Larry"
LF03720U Manichino **Baby Buddy** per la resuscitazione CPR nel neonato
LF03953U Manichino **CRiSis**™
LF03955U Manichino **CRiSis**™ versione lusso
LF03965U Manichino **CRiSis**™ versione lusso extra
LF04001U Manichino infermieristico **GERi**™
LF04020U Manichino infermieristico **KERi**™
LF04021U Manichino **KERi**™ di base
LF04022U Manichino **KERi**™ avanzato
LF04030U Manichino **GERi**™ avanzato
LF04040U Manichino **GERi**™ di base
LF06001U Manichino adulto/bambino **CPR Prompi**™
LF06012U Manichino neonato **CPR Prompi**™
LF06200U Ausilio portachiavi **CPR Prompi**™
LF06204U Ausilio soccorso e didattica **CPR Prompi**™

Nasco Fort Atkinson

901 Janesville Avenue, P.O. Box 901
Fort Atkinson, Wisconsin 53538-0901, U.S.A.
1-800-558-9595

www.eNasco.com • E-mail: lifeform@eNasco.com

COPYRIGHT © NASCO 1982 PRINTED IN U.S.A. NP 058-82-Italian/RV 1-06